

TEPLOMER LEKÁRSKY BEZORTUŤOVÝ

SK

Návod na použitie

Classic TC-01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimálny rozsah merania: 35,0–42,0 °C

Rozlíšenie: 0,1 °C

Presnosť: + 0,1 °C / - 0,15 °C

Prevádzková teplota: 20–42 °C

Teplota skladovania: 20–42 °C

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

1. Vyvarujte sa pádu teplomeru a nevystavujte ho silným nárazom.
2. Teplomer neohýbajte a nehrýzte do snímača.
3. Uschovávajte mimo dosahu detí.
4. Teplomery s poškodeným skleneným plášťom ďalej nepoužívajte (hrozí riziko poranenia).

METÓDY MERANIA TEPLOTY

Meranie v ústach

Táto metóda poskytuje rýchle a presné výsledky. Hrot teplomeru (snímač) umiestnite pod jazyk naľavo alebo napravo od koreňa do jednej z dvoch podjazykových priehlbín. Za normálnu teplotu pri použití tejto metódy sa obvykle považuje 37 °C (čas merania 3–5 minút).

Meranie v konečníku

Táto metóda je uprednostňovaný spôsob merania teploty u detí. Na tento účel je hrot teplomeru (snímač) zavedený do konečníka (cca 2 cm). Pre jednoduché a pohodlné zavedenie je vhodné na hrot teplomeru naniesť pleťový krém alebo detský olej. PRERUŠTE MERANIE, ak zaznamenáte akýkoľvek odpor. Za normálnu teplotu pri použití tejto metódy sa obvykle považuje 37,6 °C (čas merania 3–5 minút).

Meranie v podpazuší

Umiestnite hrot teplomeru do podpazušia a pritlačte ruku pevne k telu. Za normálnu teplotu pri použití tejto metódy sa obvykle považuje 36,7 °C (čas merania 5 minút).

POZNÁMKA: Ak chcete predísť nepresným údajom, zaistite čas merania najmenej 5 minút.

POZNÁMKA: Deti by mali celý proces merania teploty absolvovať v prítomnosti dospelých osôb.

POZNÁMKA: Všetky teplomery boli výrobcom skontrolované a spĺňajú predpísanú toleranciu chyby merania tohto prístroja (+0,1 °C/-0,15 °C).

SPÔSOB POUŽITIA

1. Pred začatím merania sa uistite, že indikačná kvapalina je pod prvou značkou, ktorá je očíslovaná (medzi 35 °C a 36 °C).
2. Teplomer umiestnite do príslušnej polohy (do podpazušia, do konečníka, do úst).
3. Teplomer potrebuje na zistenie telesnej teploty cca 5 minút.
4. Po meraní pripravte teplomer na ďalšie použitie. **Na toto je potrebné uchopiť teplomer za jeho hornú časť a rýchlymi pohybmi zápästia smerom dole (15–20×) triasť tak, aby kvapalina klesla späť smerom k hrotu teplomeru.**

ODPORÚČANIE: pre jednoduchšie strasenie je možné použiť puzdro na strasenie (doplnkové príslušenstvo – môžete zakúpiť samostatne).

POZNÁMKA: Pokiaľ je teplota pri skladovaní nižšia než 20 °C, umiestnite teplomer pred použitím do teploty 20–30 °C na najmenej na 1–2 hodiny alebo do teploty 30–35 °C na 10 minút.

POKYNY NA ČISTENIE

Teplota čistiaceho alebo dezinfekčného roztoku nesmie prekročiť 42 °C.

Teplomer očistite studenou vodou a mydlom alebo vatovým tampónom namočeným do alkoholu alebo teplomer ponorte do antiseptického roztoku. Ak dôjde k rozbitiu teplomeru, uniknutú kvapalinu možno bez rizika odstrániť pomocou bežných prostriedkov v domácnosti (papierové utierky, špongie a pod.).

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na tento teplomer sa vzťahuje záruka dva roky od dátumu nákupu na chyby spôsobené výrobcom pri normálnom použití v domácnosti. Táto záruka sa vzťahuje na všetky časti teplomeru. Nezahŕňa však škody na teplomere spôsobené neodbornou manipuláciou.

Výrobca:

Jiansgu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.
No. 36 West Yandu Road, Yandu New District
224005 Yancheng, Jiangsu, China

Zástupca pre Európu:

Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting
Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, UK

Distribútor pre SR:

Celimed, s.r.o.
Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, www.celimed.sk



0482

Dátum poslednej revízie textu: 02/2023
Vyrobené v Číne.