

**Prevádzková teplota prostredia, vlhkosť a tlak vzduchu:**  
**Skladovacia/transportná teplota prostredia, vlhkosť a tlak vzduchu:**  
**Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:**  
**Hmotnosť:**  
**Vonkajšie rozmery:**  
**Súčasťi výbavy:**

**Voliteľné zdravotnícke príslušenstvo:**

**Aplikovaná časť:**

teplota prostredia +10 °C až +40 °C (+50 až +104 °F), relatívna vlhkosť 30 % – 85 % (nekondenzujúca), 700 ~ 1 060 hPa  
teplota prostredia -20 °C až +60 °C (-4 až +140 °F), relatívna vlhkosť 10 % – 95 % (nekondenzujúca), 700 ~ 1 060 hPa  
Vnútorne napájané zdravotnícke zariadenie

cca 12 g (s vloženou batériou)  
19,4 mm (š) x 132,5 mm (d) x 10,0 mm (h)  
hlavné zariadenie, testovacia batéria (alkalická mangánová gombiková batéria LR41), skladovacie puzdro, leták s návodom  
Kryt sondy MC-PP100-E

 = typ BF (špička so snímačom)

\* IP klasifikácia zodpovedá úrovni ochrany poskytovanej podľa normy IEC 60529.  
Toto zariadenie je chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším, ako napríklad prst.  
Toto zariadenie je chránené pred postrannými padajúcimi kvapkami vody, ktoré spôsobujú problém s normálnou prevádzkou.

**Poznámky:**

- Zmena technických parametrov vyhradená.
- Toto zariadenie je vodotesné.
- Špička teplomera obsahuje nikel.
- Tento teplomer neobsahuje opravovateľné súčasti. OMRON odporúča overovať presnosť teplomera každé dva roky u autorizovaných zástupcov OMRON.
- Závažné udalosti vzniknuté v súvislosti s týmito zariadením hlásite výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento výrobok od spoločnosti OMRON bol vyrobený v súlade s príslym systémom zabezpečenia kvality spoločnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

**Záruka**

Na tento produkt poskytuje OMRON záruku 3 roky odo dňa zakúpenia. Poškodenie, ktoré vznikne nevhodným zaobchádzaním, záruka nekrýje.  
Batérie a obaly nie sú predmetom záruky. Všetky ostatné nároky na kompenzáciu škôd sa vylučujú.  
Pre uplatnenie nároku na záruku je nevyhnutný doklad o zakúpení.

 Dôkladne si prečítajte všetky pokyny tohto návodu.

Toto zariadenie spĺňa európsku normu EN12470:2000, Lekárske teplomery – Časť 3: Kompaktné elektrické teplomery (predikatívne a nepredikatívne) s maximálnym vybavením.

| Opis symbolov                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Aplikovaná časť - typ BF<br>Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým prúdom (zvodový prúd) |  | Číslo šarže                                         |
|  | Označenie CE                                                                             |  | Teplotné obmedzenie                                 |
|  | Označenie UKCA                                                                           |  | Obmedzenie vlhkosti                                 |
|  | Jedinečný identifikátor zariadenia                                                       |  | Obmedzenie atmosférického tlaku                     |
|  | Stupeň ochrany pred vniknutím podľa normy IEC 60529                                      |  | Dátum výroby                                        |
|  | Potreba, aby si používateľ pozrel návod na použitie                                      |  | Technológia spoločnosti OMRON Healthcare v Japonsku |
|  | Zdravotnícka pomôcka                                                                     |                                                                                   |                                                     |
|  | Nepoužívajte opakovane                                                                   |  | Balenie MIX                                         |

**Dôležité informácie o elektromagnetickej kompatibilite (EMC)**  
Zariadenie MC-343F-E4 vyrobené spoločnosťou OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. spĺňa normu EN60601-1-2:2015 o elektromagnetickej kompatibilite (EMC).  
Ďalšia dokumentácia v súlade s ustanoveniami tejto normy o EMC je k dispozícii od spoločnosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedenej v tomto návode na použitie alebo na internetovej adrese [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com) Pozrite si informácie o EMC pre zariadenie MC-343F-E4 na webovej stránke.

**Správna likvidácia tohto produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)**  
Toto označenie uvádzané na produkte alebo v príslušnej dokumentácii znamená, že produkt sa po dosiahnutí konca životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. S cieľom zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu separujte tento produkt od iných typov odpadu. Zodpovednou recyklačiou podporíte udržateľné opakované využitie materiálových zdrojov.  
Používatelia v domácnostiach by sa mali obrátiť na predajcu, od ktorého si kúpili tento produkt, alebo na miestny úrad, a požiadať o informácie týkajúce sa recykliácie tohto produktu spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.  
Používatelia – spoločnosti by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a overiť podmienky a požiadavky nákupnej zmluvy. Tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s ostatným komerčným odpadom.  
Tento produkt neobsahuje žiadne nebezpečné látky.


Použitie batérie sa musia likvidovať v súlade s národnými predpismi týkajúcimi sa likvidácie batérií.


|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výrobca</b><br>         | <b>OMRON HEALTHCARE CO., LTD.</b><br>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,<br>617-0002 JAPONSKO                                                                                                                                           | <b>Dcérske spoločnosti</b>                                                                                                        | Dovozca do Spojeného kráľovstva a zodpovedná osoba pre Spojené kráľovstvo<br><b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b><br><a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a> | <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b><br>Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,<br>MK15 0DG, UK<br><a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a> |
| <b>Zastúpenie v EÚ</b><br> | <b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b><br>Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDSKO<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dovozca do EÚ</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Výrobná prevádzka</b>                                                                                     | <b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b><br>No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,<br>Binh Duong Industry-Services-Urban Complex,<br>Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,<br>Binh Duong Province, Vietnam |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Distribúcia a servis v Slovenskej republike</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CELIMED s.r.o.</b> , Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, <a href="http://www.celimed.sk">www.celimed.sk</a> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |

Vyrobené vo Vietname

# OMRON

## DIGITÁLNY TEPLOMER

### Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

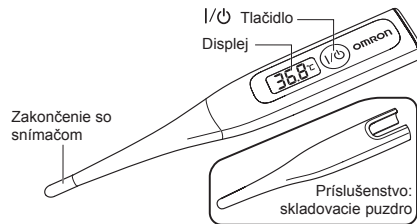

Zakončenie so snímačom

Príslušenstvo: skladovacie puzdro

IM-MC-343F-E4-SK-02-07/2022  
Dátum vydania: 2022-09-28

**Úvod**  
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili digitálny teplomer OMRON Flex Temp Smart.

**Účel použitia**  
Teplomer, ktorý ste si kúpili, slúži na bezpečné, presné a rýchle meranie teploty. Teplotu ním môžete merať v konečníku (rektálne), v ústach (orálne) alebo pod pazuchou (axilárne). Tento teplomer odstraňuje akékoľvek obavy ohľadom rozbitého skla alebo nebezpečenstva spojeného s ortuťou. Uvedomte si, že vaša teplota je ovplyvnená fajčením, jedlom alebo pitím.  
Ak máte otázky súvisiace s teplotou, obráťte sa na svojho lekára.

**Cieľová obsluha**  
Tento teplomer má byť obsluhovaný dospelými osobami, ktoré dokážu porozumieť tomuto návodu na použitie.  
Teplomer je určený najmä na používanie v domácnostiach.

**Dôležité bezpečnostné upozornenia**  
V záujme správneho používania tohto výrobku je nutné vždy dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie.

- ⚠ Výstraha**
  - Vysoká alebo dlhodobá horúčka vyžaduje zákrok lekára (platí najmä v prípade malých detí). Obráťte sa na svojho lekára.
  - Dôkladne si prečítajte priložený návod, aby ste zaistili správne meranie teploty, a postupujte podľa neho. Uvedomte si, že merania teploty sú ovplyvnené viacerými faktormi vrátane fyzickej námahy, pitia teplých alebo studených nápojov pred meraním aj technikou merania.
  - Počas merania sa nehybte.
  - Použitie nameraných hodnôt teploty pri samodiagnostike je nebezpečné a môže viesť k zhoršeniu existujúceho stavu. Ohľadom interpretácie výsledkov sa poraďte s lekárom.
  - Tento teplomer je určený na meranie teploty v ústach, v konečníku alebo pod pazuchou. Nesnažte sa merať teplotu na iných miestach, ako napríklad ucho, keďže by to mohlo viesť k falošným výsledkom či poraneniu.
  - Teplomer skladujte mimo dosahu detí. Nenechávajte deti merať si teplotu bez dohľadu. Deti sa môžu pri pokuse zmerať si teplotu bez dohľadu zraníť.
  - Nenechávajte batériu, kryt batérie ani kryt sondy na mieste, kde sa k nim môžu dostať deti. Deti by ich mohli prehltnúť. Ak dieťa prehltne batériu, kryt batérie alebo kryt sondy, ihneď kontaktujte lekára.
  - Kryt sondy nikdy nepoužívajte viac než jedenkrát. Mohlo by to viesť ku križovej infekcii.
  - Nepokúšajte sa o merania, ak je teplomer mokrý (vlhký), v opačnom prípade môžu byť namerané hodnoty nesprávne.
  - Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenía, ak ich prehltnú malé deti.
  - Pomôcku nepoužívajte naraz s inými zdravotníckymi elektrickými zariadeniami. Môže to viesť k nesprávnemu fungovaniu zariadenia a/alebo potenciálne nesprávnym meraniam.


- ⚠ Pozor**
  - Do teplomera nezahryzávajte. Mohlo by to viesť k zlomeniu a/alebo poraneniu.
  - Nedovoľte, aby teplomer zdieľalo viac ľudí.
  - Teplomer sa nepokúšajte rozoberať a opravovať. Mohlo by to viesť k nesprávnym meraniam.
  - Batériu sa nesnažte spáliť. Mohla by vybuchnúť.
  - Pri výmene batérie dávajte pozor na polaritu (+-). V opačnom prípade môže z batérie začať vytekať elektrolyt, môže sa začať generovať teplo alebo môže batéria prasknúť (vybuchnúť) a celý prístroj sa môže poškodiť.
  - Ak nebudete používať teplomer 3 mesiace alebo dlhšie, vyberte z neho batériu. V opačnom prípade môže z batérie začať vytekať elektrolyt, môže sa začať generovať teplo alebo môže batéria prasknúť (vybuchnúť) a celý prístroj sa môže poškodiť.
  - Teplomer nepoužívajte na miestach so silnými statickými elektrickými alebo elektromagnetickými poľami. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnych nameraných hodnôt a celkového zlyhania zariadenia.
  - Osoby, ktoré majú ťažkosti s konečníkom, by si nemali teplotu merať rektálne. Mohlo by to zhoršiť ich problém.
  - Nestúpajte na pomôcku ani na jej pevné puzdro.
  - Špičku neohýbajte o viac ako 45 stupňov.
  - Pri meraní zaistite, aby sa vo vzdialenosti do 30 cm od zariadenia nenachádzali žiadne mobilné telefóny ani iné elektrické zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické poľa. Môže to viesť k nesprávnemu fungovaniu zariadenia a/alebo potenciálne nesprávnym meraniam.

**Všeobecné bezpečnostné upozornenia**

- Teplomer nepoužívajte na meranie ničoho iného, ako je telesná teplota u ľudí.
- Teplomer ani skladovacie puzdro nepúšťajte na zem ani ich nevystavujte šokom či vibráciám.

**1. Prepínanie medzi Fahrenheitovou a Celziouvu stupnicou**

Stlačte tlačidlo I/O na 7 sekúnd, kým nezačujete pípnutie. Zobrazenie sa zmení na iný merací systém v čase znenia pípnutia.

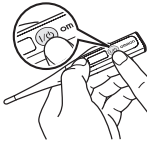

Po 5 sekundách

Po 2 sekundách

°F 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105  
°C 34.4 35.0 35.6 36.1 36.7 37.2 37.8 38.3 38.9 39.4 40.0 40.6

FAHRENHEIT/CENTIGRADE CONVERSION CHART

188.8 °C

°C to °F (°C na °F)



°F to °C (°F na °C)

Zobrazia sa všetky symboly displeja.

Teplomer sa automaticky vypne.

## 2. Namerané údaje o teplote

1. Stlačte tlačidlo .  
Na niekoľko sekúnd sa uvedie výsledok predchádzajúceho merania. Potom prebehne funkcia interného testovania a zobrazí sa 37,0 °C (98,6 °F).  
**Poznámka:** Keď sa zobrazí iná teplota ako 37,0 °C (98,6 °F), pozrite si časť „6. Indikácie na displeji a riešenie problémov“, kde nájdete podrobnosti ohľadom riešenia problému.

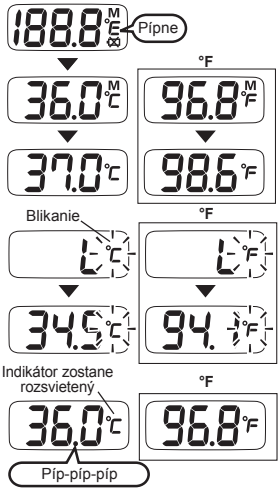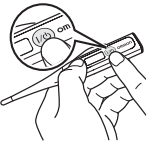

Zobrazia sa všetky symboly displeja.

Zobrazí sa práve nameraná teplota a indikátor M.

Testovacie zobrazenie 37,0 °C (98,6 °F)

Keď indikátor [°C (°F)] bliká, teplomer je pripravený na meranie.

Spustí sa meranie teploty a indikátor [°C (°F)] bude blikat.

Keď sa nameria výsledná teplota, indikátor [°C (°F)] prestane blikat a zostane svietiť.

2. Teplomer priložte na miesto určené pre meranie teploty.

**Poznámka:** aj ak sa nezobrazí indikátor „L“ (zobrazí sa len teplota), nejde o chybu. Teplotu možno odmerať aj takto.

3. Trikrát zaznie zvuková signalizácia (píp-píp-píp), aby určila najskoršie nameranie teploty. Vytiahnite teplomer z miesta merania a zistíte nameranú teplotu.

**Časové odlišnosti zvukovej signalizácie**

**Konečník:** cca 10 sekúnd

**Ústa:** cca 20 sekúnd

**Pazucha:** cca 25 sekúnd\*

\* Zvuková signalizácia zaznie vtedy, keď je zmena v meraní teplôt dostatočne nízka na to, aby sa dala určit telesná teplota. Reálne presné meranie bude trvať dlhšie, ako uvádza kapitola 9 (podľa podmienok prostredia).

**Poznámky:**

- Meranie pokračuje aj po zvukovej signalizácii.
- Zvuková signalizácia vychádza z predpokladu, že má prostredie teplotu 23 stupňov.
- Nakoľko bývajú hodnoty namerané v ústach a pod pazuchou nižšie, odporúčame používať teplomer rektálne, pretože v konečníku sa dosahuje najpresnejší výsledok.

4. Teplomer vypnite. Pred zasunutím do puzdra je nutné teplomer vyčistiť a vydezinfikovať.

**Poznámky:**

- Nameraný údaj sa automaticky uloží do pamäte.
- V záujme šetrenia energie batérie teplomer ručne vypnite. Teplomer sa automaticky vypne 30 minút po použití alebo 3 minúty po zapnutí, ak sa nepoužije.

## 3. Zobrazenie poslednej teploty

Ak chcete zobraziť poslednú nameranú teplotu, stlačte tlačidlo . Podrobnosti nájdete v časti „2. Namerané údaje o teplote“.

## 4. Správne meranie

Ak sa nepoužije správna metóda merania teploty, meranie presnosti sa nedá zaručiť.

**Rektálne meranie:**

- Pri rektálnom meraní sa vždy odporúča použiť kryt sondy.
- Bežne sa používa pre malé deti, u ktorých je problém merať teplotu v ústach alebo pod pazuchou.
- Teplomer natrite neдрáždivým gélom.
- Jemne zasuňte špičku do konečníka, avšak nie viac než 1,3 cm. Ak konečník kladie odpor, teplomer do neho nezasúvajte nasilu.
- Po použití teplomer vydezinfikujte.

**Orálne meranie (od 4 rokov):**

Pred odčítaním údajov o nameranej teplote by mali byť ústa 5 minút zatvorené.



- Teplomer vložte do úst pod jazyk tak, aby bol naľavo alebo napravo od koreňa jazyka.
- Pritláčaním jazyka smerom nadol pridržiavajte teplomer na mieste.
- Pridržiavajte teplomer tak, aby sa v ústach neposúval.

**Meranie pod pazuchou (axilárne):**

- Špičku so snímačom umiestnite do stredu pazuchy.



- Teplomer a jeho špičku so snímačom v pazuche zaistíte miernym tlakom ramena smerom k telu.

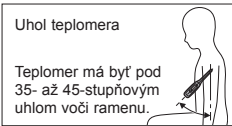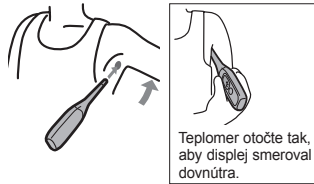

**Nasledujúce podmienky môžu negatívne vplyvať na správnosť údajov pri meraní.**

- Meranie teploty hneď po cvičení, kúpaní, jedení či pití bude viesť k nesprávnemu výsledku.  
**Opatrenie:** Pred meraním teploty počkajte aspoň 30 minút.
- Meranie teploty hneď po pohybovaní sa v okolí.  
**Opatrenie:** Teplotu merajte hneď po zobudení alebo počkajte aspoň 30 minút po pohybe v okolí.
- Pohyb v okolí po zobudení zvyšuje telesnú teplotu.

**Nasledujúce situácie môžu viesť k nesprávnemu meraniu pri meraní v podpazuši:**

- Silné potenie v podpazuši  
**Opatrenie:** Pred meraním teploty si dôkladne utrite pazuchu.
- Meranie teploty po dlhodobom zotrúvaní pod prikrývkami


## 5. Výmena batérie

Batéria: alkalická mangánová gombíková batéria LR41 (bežne v predaji)  
Použite batériu v jej odporúčanom období.


**Upozornenie na potrebu výmeny batérie (  )**

Keď sa po zapnutí teplomera zobrazí tento indikátor upozorňujúci na vybitú batériu, vymeňte batériu.

1. Na odstránenie krytu použite mincu.

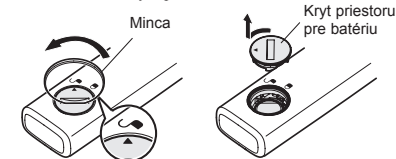


2. Vyberte batériu.

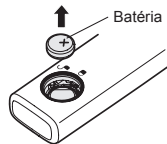

3. Podľa náčrtu vložte novú batériu s označením „+“ smerujúcim nahor. Dbajte na to, aby ste vždy vložili batériu so správnou orientáciou polarít.



4. Na vrátenie krytu na miesto použite mincu.

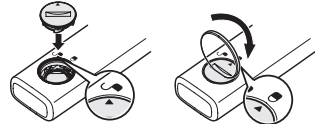

**Poznámky:**

- Teplomer sa dodáva s vloženou batériou na účely testovania. Táto batéria nemusí mať rovnakú životnosť ako nová batéria.
- Testniaci krúžok okolo skrutky neuvoľňujte. Porušila by sa vodotesnosť a mohli by sa ziskávať nesprávne údaje alebo nastať porucha.

## 6. Indikácie na displeji a riešenie problémov

V prípade, že sa počas merania vyskytne nejaký z nižšie uvedených problémov, najprv skontrolujte, či sa vo vzdialenosti do 30 cm od zariadenia nenachádza žiadne iné elektrické zariadenie. Ak problém pretrváva, pozrite tabuľku nižšie.

| Indikátor                                                                                                 | Príčina                                                                                                                                                                                            | Riešenie                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  (low – nízka)         | Zobrazuje sa, keď je teplota v oblasti snímača nižšia než 32 °C (89,6 °F).                                                                                                                         | Nie je to porucha, môžete indikáciu ignorovať a zmerať teplotu. |
|  (high – vysoká)       | Zobrazuje sa, keď je teplota v oblasti snímača vyššia než 42 °C (107,6 °F).                                                                                                                        | Znížte teplotu okolia snímača a potom spustíte meranie teploty. |
| Zobrazuje sa teplota vzduchu                                                                              | Zobrazuje sa, keď teplota prostredia presahuje 32 °C (89,6 °F).                                                                                                                                    |                                                                 |
| Po zobrazení výsledku posledného merania sa v prípravnej testovacej fáze nezobrazuje [37,0 °C (98,6 °F)]. | Teplomer niekoľkokrát zapnite a vypnite. Ak sa v testovacej fáze uvádza teplota mimo rozsahu [36,9 °C (98,4 °F)] až [37,1 °C (98,8 °F)], obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu OMRON. |                                                                 |

## 7. Skladovanie

Teplomer skladujte vždy v puzdre.

- Teplomer neskladujte na nasledujúcich miestach, aby sa nepoškodil:
  - Vo vlhkom prostredí.
  - V prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou alebo na priamom slnku. Miesta blízko zdrojov tepla, veľkého množstva prachu alebo v prostredí s vysokou koncentráciou solí vo vzduchu.
  - Na šikmých miestach a tam, kde pôsobia nárazy, úder, vibrácie.
  - V skladoch liekov a na miestach s plynmi spôsobujúcimi koróziu.

## 8. Čistenie a dezinfekcia

Zariadenie pred použitím vyčistite a vydezinfikujte v týchto prípadoch;

- pri prvom použití od zakúpenia
- ak sa zariadenie dlhú dobu nepoužívalo
- ak zariadenie používa viac ako jedna osoba

Pri čistení sa riadte krokom č. 1 a pri dezinfekcii krokmi č. 1 – 3.

1. Zariadenie utrite vlhkou handričkou navlhčenou studenou vodou.

2. Utrite ho mäkkou handričkou navlhčenou dezinfekčným prostriedkom, etylalkoholom (70 %) alebo izopropylalkoholom (70 %).

3. Potom nechajte uschnúť na vzduchu.

Riadte sa pokynmi výrobcu dezinfekčného prostriedku.

Oblasť snímača teplomera sa nepokúšajte dezinfikovať ponorením do alkoholu ani do horúcej vody s teplotou nad 50 °C.

## 9. Technické údaje

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategória produktu:</b>       | Klinické elektronické teplomery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opis produktu:</b>            | Digitálny teplomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Model (kódové označenie):</b> | Flex Temp Smart (MC-343F-E4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Napájanie:</b>                | 1,5 V jednosm., 1 alkalická mangánová gombíková batéria LR41                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Príkon:</b>                   | 0,1 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obdobie životnosti:</b>       | 4 roky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Životnosť batérie:</b>        | približne 3 roky alebo viac (3-krát denne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Snímací prvok:</b>            | termistor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Metóda merania:</b>           | reálne priame meranie (bez predikcie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IP klasifikácia:</b>          | IP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zobrazovanie teploty:</b>     | 3-miestne (°C) alebo 4-miestne (°F) s prírastkom po 0,1 stupňa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Presnosť merania:</b>         | ± 0,1 °C (32,0 °C až 42,0 °C)<br>± 0,2 °F (89,6 °F až 107,6 °F)<br>(pri meraní v prostredí so štandardnou izbovou teplotou 23 °C (73,4 °F) v testovacej komore s konštantnou teplotou) v ústach, v konečníku, v podpazuši priamy režim<br>pazucha: cca 10 minút<br>ústa/konečník: cca 5 minút<br>32,0 °C až 42,0 °C (89,6 °F až 107,6 °F)<br>1 záznam |
| <b>Poloha merania:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Režim merania:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Čas merania:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Merací rozsah:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pamäť:</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |