

# Jednoduché používanie

OMRON MicroAIR Go U300 je navrhnutý pre jednoduchú a pohodlnú inhaláciu. Intuitívne ovládanie jedným tlačidlom, jednoducho plniteľná nádobka na liečivo a nenáročné čistenie umožňujú komfortné každodenné používanie doma aj na cestách. Kompaktné rozmery a nabíjanie cez USB-C zabezpečujú, že je inhalátor pripravený vždy, keď ho potrebujete.

## Postup inhalácie:

1. Otočením proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte kryt nádoby na liečivo a zložte ho.
2. Naplňte nádobku predpísaným liečivom v množstve 2 až 10 ml. Následne kryt opäť nasadte.
3. Na nádobku nasadte nebulizačnú masku alebo náustok.
4. Priložte nebulizačnú masku na nos a ústa alebo vložte náustok do úst.
5. Stlačením tlačidla "zapnutie" spustíte inhaláciu. Po každom nádychu zadržte dych približne na 2 až 3 sekundy, aby sa liečivo lepšie vstrebalo.
6. Opätovným stlačením tlačidla inhaláciu ukončíte. Prístroj sa automaticky vypne po 30 minútach.
7. Po ukončení inhalácie odskrutkujte kryt nádoby na liečivo a zvyšné liečivo vylejte.



OMRON



MicroAIR Go U300

## Ľahšie dýchanie vždy poruke

Objavte pohodlnú inhaláciu bez obmedzení. Tento prenosný inhalátor je navrhnutý pre aktívny životný štýl. Kombinuje kompaktný dizajn, jednoduché používanie a praktické USB-C nabíjanie, vďaka ktorému je pripravený na použitie doma, na cestách aj mimo domova.





## Prenosný

Kompaktné rozmery umožňujú mať inhalátor vždy poruke – pohodlne sa zmestí do ruky, kabelky alebo batožiny. Vďaka nabíjaniu cez USB-C je pripravený na používanie doma aj na cestách.



## Jednoduché používanie

OMRON MicroAIR Go U300 ponúka jednoduché a pohodlné používanie vďaka ovládaniu jedným tlačidlom, jednoducho plniteľnej nádobke na liečivo a nenáročnému čisteniu pre každodennú inhaláciu doma aj na cestách.



## Tichá prevádzka

Mimoriadne tichá prevádzka prináša pokojný a komfortný priebeh inhalácie. Tichý chod umožňuje diskkrétne používanie bez rušenia okolia a vytvára príjemné prostredie najmä pri inhalácii detí.

### OMRON MicroAir Go U300

# Starostlivosť o dýchacie cesty navrhnutá pre každodenný život



**Jednoduché ovládanie**



**Prenosný**



**Tichá prevádzka**



**Nabíjanie cez USB-C**

Respiračné ochorenia si vyžadujú spoľahlivú liečbu, ktorá sa prirodzene prispôsobí každodennému životu. OMRON už desaťročia vyvíja zdravotnícke pomôcky spájajúce klinickú presnosť s jednoduchým používaním. MicroAIR Go U300 prináša pohodlnú inhaláciu doma aj na cestách vďaka kompaktnému dizajnu, intuitívnemu ovládaniu a praktickému nabíjaniu cez USB-C.



## Going for Zero

Podporou širšej dostupnosti respiračnej terapie pomáhame znižovať záťaž pacientov aj ich rodín. V súlade s víziou Going for Zero sa usilujeme prispieť k lepšiemu zdraviu dýchacích ciest. OMRON MicroAIR Go U300 spája desaťročia skúseností a inovácií s jednoduchým používaním, premysleným dizajnom a praktickým nabíjaním cez USB-C. Zároveň prináša kvalitnú MESH inhaláciu za priaznivejšiu cenu, aby bola moderná respiračná terapia dostupná ešte väčšiemu počtu používateľov.